

# SIEDZISKO ORAZ DODATKI PRZY SIEDZISKU




## PŁYTA SIEDZISKA STANDARDOWA

W wózkach Netti podstawą siedziska jest płyta, do której mocowana jest poduszka siedziska za pomocą pasów rzepowych.



## PŁYTA SIEDZISKA WYSUWANA

Dodatkowo w wózku Netti III istnieje możliwość wysunięcia płyty do przodu wózka. Opcja ta ułatwia przesadzanie użytkownika (zmniejsza dystans pomiędzy wózkiem a łóżkiem, czy też ułatwia przesadzanie osoby np. do samochodu).

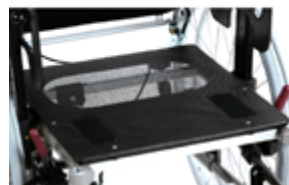

## PŁYTA SIEDZISKA COMFORT

Opcjonalnie można zamontować płytę siedziska COMFORT. Tylna część płyty siedziska posiada zamontowaną siatkę; pozwala to na odciążenie kości ogonowej i mniejszy nacisk na nią, co podnosi komfort użytkowania wózka oraz zapobiega powstawaniu odleżyn, czy dodatkowych ran.

## REGULACJA KĄTA SIEDZISKA

W wózkach możliwa jest płynna regulacja kąta siedziska. Zakres regulacji podany w tabeli. Regulacja ta, przy pomocy sprężyn gazowych pozwala na dostosowanie pozycji siedziska wózka do potrzeb użytkownika. Ma to miejsce dzięki dźwigniom zamontowanym z tyłu wózka.

W modelu Netti III istnieje możliwość (opcjonalnie) zamontowania dźwigni przy boczku pod podłokietnikiem, dzięki czemu użytkownik może sam w każdym momencie zmienić kąt siedziska w zależności od swoich potrzeb.

W modelu NETTI III EL dostępna opcja elektrycznej regulacji kąta siedziska.

## DODATKI PRZY SIEDZISKU



### KLIN KROKOWY

- Zalecany dla osób z tendencją zwierania nóg na wysokości kolan;
- zapobiega ewentualnemu wysuwaniu się z wózka;
- występuje w 3 rozmiarach;
- możliwość regulacji wysokości i głębokości klina.



### PASY ODWODZĄCE NOGI

- Zalecane również dla osób z koślawością kolan;
- zapobiega wysuwaniu się z wózka;
- poprawia stabilizację i zapewnia prawidłową postawę siedzącą w wózku.



### PELOTY UDOWE

- Ich zadaniem jest zapewnienie poprawnego ułożenia i postawy kolan oraz ud w przypadku dużego odwodzenia nóg.

	NETTI 4U CE	NETTI 4U CE PLUS	NETTI 4U CED	NETTI III
plyta siedziska standardowa	standard	standard	standard	standard
plyta siedziska wysuwana	x	x	x	opcja
plyta siedziska COMFORT	x	x	opcja	opcja
klin krokowy	x	opcja	opcja	opcja
pasy odwodzące nogi	opcja	opcja	opcja	opcja
peloty udowe	x	x	x	opcja
ręczna regulacja kąta siedziska	od -5° do +20°	od -5° do +20°	od -5° do +20°	od -9° do +16°
szerokość siedziska	40, 45, 50 cm	35, 40, 45, 50 cm	35, 40, 43, 45, 50 cm	35, 38, 40, 43, 45, 50 cm
głębokość siedziska	42,5; 45; 47,5; 50 cm	37,5; 40; 42,5; 45; 47,5; 50 cm	37,5; 40; 42,5; 45; 47,5; 50 cm	40; 42,5; 45; 47,5; 50 cm